


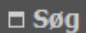
# IMPAX 6.6.1 Quick Reference Radiografer

---

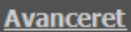
## Åbne Impax 6.6

1. Dobbelt-klik på Impax  på skrivebordet

## Simpel søgning

1. Klik på 
2. Udfyld relevante søgekriterier
3. Tryk søg eller ENTER

## Avanceret søgning

1. Klik på 
2. Vælg et søgekriterie i rullegardinet til højre
3. Skift evt. søgemetode (starter med, indeholder mv.) i det første rullevindue til højre for søgekriterienavnet
4. Indtast søgestreng
5. Tryk søg

**tip:** Avanceret søgning kan foretages på PACS eller på RIS-kriterier. RIS-kriterier muliggør søgning på en del kriterier som ikke eksisterer i PACS som f.eks. beskrivende læge, rapport-status mv., men RIS-søgninger vil ikke returnere undersøgelser uden RIS-oplysninger (eg. importerede us.)

## Søgning med wildcards

Søgninger kan foretages med wildcards (% eller \*). Wildcards kan indsættes vilkårlige steder i søgestrengen, og der kan indsættes flere wildcards i en streng. Der indsættes automatisk wildcard i slutningen af en

søgestreng.

Eks. på wildcard-søgninger:

1. 0505%0RJ1
  - a. returnerer alle fødselsår
2. An%Anders%
  - a. returnerer Anja, Anders, Anton osv. Andersen, Andersson osv.

## Foretrukne søgninger

1. Indsæt kriterier for avanceret søgning
2. Vælg Ny... i rullegardinet Foretrukne søgninger til højre
3. Navngiv din søgning og tryk OK

## Åbne undersøgelser

- Dobbelt-klik på en patient/undersøgelse
- Vælg flere patienter/undersøgelser ved at SHIFT- eller CTRL-klikke
- Højreklik på markerede patienter/undersøgelser og vælg *Åbn billeder* (åbner undersøgelser i separate faneblade i billedområdet)
- Højreklik på flere markerede undersøgelser og vælg *Cycle* (åbner udvalgte undersøgelser i billedområdet på en liste i billedområdet)

## Luk åbne undersøgelser


1. Luk enkelt undersøgelse: klik på x i undersøgelsesfanerne nederst (eller øverst) i billedområdet
2. Luk alle billeder: Hø. klik på fane nederst i billedområdet og vælg *luk alle...*

3. Luk cycle-liste: Hø. klik nederst i billedområdet og vælg *luk cycle liste...*

## Skift mellem liste-, tekst- og billedområde på 1-skærmsløsning

- Når du åbner en undersøgelse vises tekst-vinduet med RIS-oplysninger og beskrivelser
- Klik på Tekst/List i den øverste grønne bjælke for at skifte mellem liste- og tekstområde
- Klik på knapperne Tekst/Billede i øvre højre hjørne for at skifte mellem tekst- og billedområde

## Import af undersøgelser fra DICOM-destinationer


1. Klik på Placering  til hø. for søgekriterierne
2. Klik på den relevante destination
3. Indtast søgekriterier (eg. CPR-nummer)
4. Højreklik på patient eller relevante undersøgelser og klik *Hent*
5. Skift placering til system og søg igen

## Sende undersøgelser til andre destinationer

1. Højreklik på den ønskede undersøgelse
2. Vælg overfør i menuen

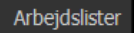
# IMPAX 6.6.1 Quick Reference Radiografer

## Tilføj destinationer til import og eksport af undersøgelser

1. Klik på  til hø. for dit brugernavn og rolle
2. Vælg *præferencer*
3. Vælg bjælken *Listeområde*
4. Vælg fanebladet *Søg efter placering* for import-destinationer
5. Vælg fanebladet *Overfør placeringer* for eksport-destinationer
6. Sæt hak ud for relevante destinationer og klik OK

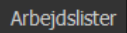
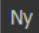
**obs:** Ændringerne optræder først efter genstart af Impax

## Åbne arbejdslistor i listeområdet

1. Klik på arbejdslistor 
2. Vælg faneblad standardarbejdslistor, personlige arbejdslistor eller planlagte arbejdslistor (afh. af hvilken type liste du vil åbne)
3. Find mappen Worklists RAD/NM til venstre, udvid og find dit hospital
4. Sæt hak i check-boksen udfør den ønskede mappe
5. Sæt hak i vinduet til højre udfør de listor du vil åbne og klik OK

**tip:** højre-klik i check-boksen ud for en mappe for at markere/ afmarkere alle undermapper

## Oprette nye personlige arbejdslistor


1. Klik på arbejdslistor 
2. Vælg fanebladet Personlige...
3. Klik på Ny 
4. Navngiv arbejdslistor







**tip:** Du kan lave en tom arbejdsliste til at gemme interessante undersøgelser i. Træk og slip undersøgelser fra en arbejdsliste til en anden for at gemme dem på listen.

## Hyppe anvendte knapper i billedområdet



	Nulstil W/L
	Rotør til højre
	Rotør til venstre
	Zoom
	Lineal/ måling
	W/L
	Nulstil billede
	Vis/ skjul tilgængelige serier
	Vinkelmåling
	Vinduesopsætning
	Annotation, tekst



	Link serier
	Slet annotationer
	Pilemarkering
	Redigør annotationer
	Link mellem undersøgelser
	Fortryd
	Gentag